

Fiche  
n°8

## La chaise portoir

**Montage**

**[A]** : Porter la chaise par le haut.

**[B]** : Poser la chaise devant soi en dépliant chaque côté.

**[C]** : Venir positionner l'assise dans les logements prévus à l'avant des deux côtés.

**[D]** : Aller chercher et remonter le dossier en travaillant avec ses cuisses.

**[E]** : Descendre les deux bagues de sécurité pour verrouiller la chaise.

**Points de sécurité**

Vérifier de chaque côté, que l'assise soit bien enclenchée dans ses logements.

Vérifier que les bagues soient descendues et verrouillées.

Ne jamais poser la chaise au sol sur sa toile, déplier les côtés pour qu'elle tienne toute seule debout.

**Matériel complémentaire**

Un harnais de portage peut être installé sur certaines chaises pour faciliter le transport du patient par les personnels de secours. Ce harnais est principalement utile au niveau du dossier de la chaise.

**Le pliage**

Le pliage s'effectue en commençant par le dossier et ensuite l'assise. Pour terminer par les côtés.

**Nettoyage**

Après usage, la chaise se nettoie selon le protocole d'hygiène adapté.

